

# ANIOS SPS Premium

Détergent  
détartrant  
désinfectant  
sanitaires



- Formulation Aniosafe: sur base acide lactique et acide glycolique
- Produit non corrosif : Formulé sans acide fort
- Haut pouvoir détartrant
- Large spectre antimicrobien
- Action simultanée de nettoyage détartrage et désinfection
- Produit prêt à l'emploi

## INDICATIONS

Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.

## CARACTERISTIQUES

- Liquide limpide bleu.
- pH du produit  $\approx$  2

PRODUIT PRÊT  
A L'EMPLOI



# ANIOS SPS Premium


Détergent, détartrant, désinfectant sanitaires

## MODE D'EMPLOI



1

Produit prêt à l'emploi. Appliquer sur les surfaces à nettoyer.

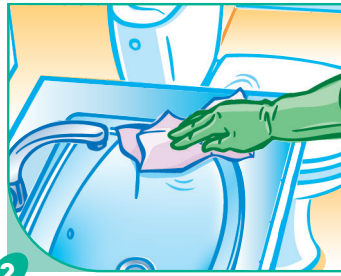

2

Laisser agir 5 minutes minimum. Frotter si nécessaire.



3

Rincer. Laisser sécher.

## COMPOSITION

- Chlorure de didécylméthylammonium (1,5 mg/g),
- Acide lactique (26,4 mg/g) / Acide Glycolique (21,0 mg/g)
- Excipients.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetages produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stocker entre +5°C et +30°C. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1 - TP2) - usage réservé aux professionnels.

## CONDITIONNEMENT

12 flacons de 750 ml  
avec pulvérisateur mousseur.....Réf. 2201.515

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13697, EN 1276, EN 13727,	5 minutes
Levures	EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697	15 minutes
Moisissures	EN 1275, EN 13697	15 minutes
	EN13624	60 minutes
Virus	Selon EN 14476 : BVDV (virus modèle HCV) PRV (virus modèle HBV)	5 minutes

