

FB Spray

DÉTERGENT DÉSINFECTANT POUR LE
BIONETTOYAGE DES SURFACES HAUTES

TRAITEMENT DE SURFACE



PULVÉRISATION



AVANTAGES ET QUALITÉS

- Solution à pH neutre
- Sans CMR *, sans colorant, sans parfum
- Prêt à l'emploi
- Nettoyage et désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires
- Actif sur *Bacillus Subtilis* et sur *Clostridium Difficile*
- Facilité d'utilisation
- Compatibilité avec un large panel de matériaux
- Enregistrement biocide : TP 02/03/04(n° inventaire : 44045)

CONTACT
ALIMENTAIRE

* Cancérogènes, Mutagènes,
toxiques pour la Reproduction

Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté



P.A.E



DÉTERGENT DÉSINFECTANT POUR LE BIONETTOYAGE DES SURFACES HAUTES

■ MODE D'EMPLOI

■ 1^{ère} utilisation du vaporisateur :

- Porter des gants et déverrouiller le pistolet

■ Utilisation :

- 1- Pulvériser uniformément le **FB Spray** directement sur la surface à traiter ou sur une lingette sèche non tissée à usage unique
- 2- Répartir la solution sur la surface avec la lingette
- 3- Le temps de contact doit être conforme à l'activité antimicrobienne recherchée
- 4- Laisser sécher ou essuyer avec une lingette sèche non tissée à usage unique

Ne nécessite pas de rinçage, sauf indication contraire du fabricant du revêtement de surface traité ou pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires

■ PROPRIÉTÉS DÉSINFECTANTES

Activités	Normes	Concentration	Temps de contact
Bactéricidie	EN 13727 + A2 / EN 13697 / EN 1276 EN 14561	100%	1 minute
		100%	5 minutes
Levuricidie	EN 13624 / EN 1650 + A1 EN 13697 / EN 14562	100%	1 minute
		100%	5 minutes
Fongicidie	EN 13697 EN 1650/EN 13624/EN14562	100%	5 minutes
		100%	10 minutes
Virucidie	EN 14476 +A1 <i>Rotavirus, PRV (virus modèle de l'hépatite B), DBV (virus modèle de l'hépatite C), Virus VRS</i>	100%	5 minutes
Sporicidie	NFT 72-230 / EN 13704 <i>B.Subtilis et Clostridium Difficile</i>	100%	15 minutes

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FS 010786)

■ CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : **Liquide fluide**
- pH : **6±1**
- Péréemption : **3 ans**

■ COMPOSITION

- Agents de surface non ioniques
- Chlorure de didecylidiméthylammonium

■ CONDITIONNEMENTS

- ① Carton de 12 flacons pissette de 500 mL..... réf. **10786160**
- ② Carton de 12 flacons de 750 ml..... réf. **1078640**
- ③ Carton de 4 bidons de 5 L
+ 2 bouchons robinets réf. **10786202**



Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.